

Інструкція з використання

(Викрутка)



Викрутка для імплантації ортодонтичного імпланта, яка має шестигранну голівку гвинта, виготовлена з антикорозійного сплаву та з нержавіючої сталі, це нестерильний виріб, що складається з частини ручки та насадки.

Матеріали: титановий сплав, супер нержавіюча сталь, нержавіюча сталь

Продуктивність: Викрутка використовується разом з насадкою для встановлення ортодонтичного імпланта.

Призначення використання: Викрутка використовується для встановлення при імплантації ортодонтичного імпланта, який має шестигранну голівку, або для встановлення зубного ортодонтичного анкерного гвинта.

1. Заходи безпеки:

- Парова стерилізація високого тиску за 30 хв. при 121°C перед використанням.
- Перевірте, чи щільно пов'язана частина ручки з насадкою.

2. Напрямки:

- Комбінуйте частину ручки з насадкою.
- Вставте комбінований комплект викруток у головки гвинта зубного ортодонтичного імпланта.
- Закрутіть гвинт на місці, яке необхідно розширити, і затягніть його, використовуючи даний драйвер.
- Після використання розберіть його та зробіть обробку області викрутки та насадки, обов'язково зробіть дезінфекцію та сушку.

3. Зберігання та обслуговування після використання:

- Зберігати при кімнатній температурі.
- Зберігати в сухому місці.
- Демонтуйте область обробки леза та зберігайте його.

4. Застереження:

- Не застосовуйте надмірну силу.

5. Упаковка:

- Зовнішній корпус: PE вініловий мішок.
- Дата придатності: не застосовується.
- Зберігання: Зберігати в атмосферному стані.
- Термін придатності: Необмежений
- Найменування товару: Медичне обладнання.
- * Обміну підлягають вироби з будь-якими помітними деформаціями, недоліками або пошкодженнями.



	БіоМатеріалс Корея, Інк., № 329, № 331, # 413, 150, Чоджонг-деро, Ханам-сі, Конгідо, Республіка Корея
Уповноважений представник в Україні	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Орто-Медина» м. Київ, 03150. Україна, вул. Антоновича 172, офіс1013, Код за ЄДРПОУ 33786428, e-mail: ortomedina1013@gmail.com тел. +38 067-325-25-20
<i>Дата останньої редакції: 22.10.2020</i>	

Інструкція з використання

(Насадка)



Цей пристрій є насадкою для вкручування та імплантації ортодонтичного імпланта.

Інструменти виготовлялися з нержавіючої сталі з високою стійкістю до корозії. Цей пристрій є нестерильним та може бути використаним повторно.

Матеріали: Супер нержавіюча сталь, нержавіюча сталь.

Продуктивність: Насадка використовується разом з рукояткою (ручкою) для встановлення ортодонтичного імпланта.

Призначення використання: Інструмент, який використовується для встановлення ортодонтичного імпланта (або зубного ортодонтичного анкерного гвинта).

1. Заходи безпеки та попередження:

- Перед застосування імплант слід стерилізувати.
- Спосіб стерилізації: при температурі 121 °С, час витримки: 30 хв.
- Перевірте, чи щільно пов'язана ручка (рукоятка) з насадкою.
- Встановлювати імплант має право тільки фахівець з повним розумінням інструкцій.

2. Порядок експлуатації:

- З'єднайте деталь ручки (рукоятки) з насадкою.
- Комбінована головна частина насадки з головкою ортодонтичного анкерного гвинта або кісткового гвинта.
- Покладіть гвинт на оброблювану ділянку та вставте гвинт з драйвером.
- Після використання демонтуйте драйвер (ручку) та насадку, почистіть та висушіть їх.

3. Зберігання та обслуговування: рукоятка

- Зберігати при кімнатній температурі.
- Зберігати в сухому місці.
- Після використання слід розібрати драйвер (ручку), насадку і тримати в сухому місці.

4. Застереження

- Не застосовуйте надмірну силу.

5. Упаковка:

- Зовнішній корпус: РЕ-вініловий мішок.
- Дата придатності: не застосовується.
- Зберігання: зберігати в атмосферному стані.
- Термін придатності: Необмежений
- Найменування товару: Медичне обладнання.
- * Обміну підлягають вироби з будь-якими помітними деформаціями, недоліками або пошкодженнями.



	БіоМатеріалс Корея, Інк., № 329, № 331, # 413, 150, Чоджонг-деро, Ханам-сі, Конгідо, Республіка Корея
Уповноважений представник в Україні	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Орто-Медіна» м. Київ, 03150. Україна, вул. Антоновича 172, офіс1013, Код за ЄДРПОУ 33786428, e-mail: ortomedina1013@gmail.com тел. +38 067-325-25-20
<i>Дата останньої редакції: 22.10.2020</i>	

Інструкція з використання

(Ручна викрутка-трещетка)

Цей пристрій призначений для вкручування та імплантацію ортодонтичного імпланта.

Продуктивність: Інструмент виготовлений з нержавіючої сталі з високою стійкістю до корозії. Цей пристрій є нестерильним та може бути використаний повторно.

Призначення використання: Інструмент, який використовується для встановлення ортодонтичного імпланта (або зубного ортодонтичного анкерного гвинта). За допомогою трещітки, можливо контролювати силу вкручування.

Матеріали: нержавіюча сталь.



1. Заходи безпеки та попередження:

- Ручну викрутку-трещітку перед використанням слід стерилізувати.
- Спосіб стерилізації: при температурі: 121°C, час витримки: 30 хв.
- Перед використанням, переконайтесь, що немає деформації, подряпин та пошкоджень зовнішнього вигляду.
- Працювати з інструментами має право тільки фахівець з повним розумінням інструкцій.

2. Порядок експлуатації:

- Перед використанням виберіть належний інструмент відповідно до його призначення.
- Зафіксуйте з'єднувальну частину приладу із підключенням викрутки-трещітки.
- Після використання інструмент повинен чиститися та висушуватися в атмосферному (сухому) приміщенні.

3. Зберігання та обслуговування:

- Зберігати при кімнатній температурі.


4. Застереження:

- Слід бути обережними щодо деформацій навколо з'єднувальної частини.

5. Упаковка:

- Зберігання: зберігати в атмосферному стані.
- Термін придатності: необмежений.
- Найменування товару: медичне обладнання.
- * Обміну підлягають вироби з будь-якими помітними деформаціями, недоліками або пошкодженнями.



	БіоМатеріалс Корея, Інк., № 329, № 331, # 413, 150, Чоджонг-деро, Ханам-сі, Конгідо, Республіка Корея
Уповноважений представник в Україні	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Орто-Медина» м. Київ, 03150. Україна, вул. Антоновича 172, офіс1013, Код за ЄДРПОУ 33786428, e-mail: ortomedina1013@gmail.com тел. +38 067-325-25-20
<i>Дата останньої редакції: 22.10.2020</i>	